



Contour[®] plus ONE[»]

Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

CONTOUR PLUS ONE

nutika glükomeetri
smartLIGHT indikaatortule
funktsiooni kasutamine.




Contour[®]
plus **ONE**[™]

Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Enne raviplaani, toitumis- või treeningharjumuste muutmist konsulteerige alati eelnevalt arstiga.

© Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

diabetes.ascensia.com

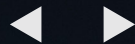

SmartLIGHT indikaatorituli
annab kohest tagasisidet
veresuhkrunäidu kohta.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

1.

SmartLIGHT funktsioon

Pärast veresuhkru mõõtmist (juhul, kui funktsioon "Target Light" on aktiveeritud) süttib testriba sisestuskohas tuli, mille värvus näitab, kas antud veresuhkrunäit jääb seadistatud sihtvahemiku normpiiridesse.



Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

2.

SmartLIGHT funktsioon

Kui veresuhkrunäit jääb sihtvahemikku, siis on tuli roheline ja glükomeeter piiksub.

Näit sihtvahemiku normi piires - "In Target"



Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

3.


SmartLIGHT funktsioon

Kui veresuhkrunäit on allpool sihtvahemikku, siis on tuli punane ja glükomeeter piiksub.

Allpool sihtvahemiku normi - “Below Target”



Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

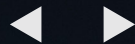

4.

SmartLIGHT funktsioon

Kui veresuhkrunäit on sihtvahemikust kõrgem, siis on tuli kollane ja glükomeeter piiksub.

Sihtvahemikust kõrgem - “Above “Target”



Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

5.

SmartLIGHT funktsioon

Juhul, kui te ei valinud söögiaja märgendit, võrdleb smartLIGHT veresuhkrunäitu teie keskmise glükoositaseme sihtvahemikuga.



Contour[®]
plus ONE[»]
Vere glükoosisisalduse
monitoorimissüsteem

Kui teil tekib küsimusi **CONTOUR PLUS ONE** nutika glükomeetri või Contour Diabetes rakenduse kohta, siis konsulteerige arstiga. Lsainfot toodete kohta leiate kasutusjuhendist.

Lisainfot toodete ja nende kättesaadavuse kohta teie riigis leiate veebiaadressilt **diabetes.ascensia.com**.



Esitatud patsiendiandmed on näitlikud.
Konsulteerige alati perearstiga enne raviplaani, toitumis- või treeningharjumuste muutmist.



Apple ja Apple logo on Ameerika Ühendriikides ja mujal registreeritud Apple Inc. kaubamärgid. Apple Store on Apple Inc. registreeritud teenusmärk.

Bluetooth sõnatähis ja logo on Bluetooth SIG Inc. registreeritud kaubamärgid, mille kasutamine on litsentseeritud. Google Play ja Google Play logo on Google Inc. registreeritud kaubamärgid.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Contour on Ascensia Diabetes Care Holdings AG registreeritud kaubamärgid.



**Contour[®]
plus ONE[™]**
Vere glükoosisalduse
monitoorimissüsteem

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions